

KARBONMONOKSİT
ÖLÇÜM CİHAZI



TABATABA^{V3}[®]

İLE NEFESİNİZİ GERİ KAZANIN



VERİLEN HAVADA CO ANALİZÖRÜ:

- Modern ve kullanımı kolay arayüz
- Geniş dokunmatik ekran
- PPM, % HbCo ve % fetal HbCo cinsinden anlık sonuç
- Hücre ömrü: 5 yıl
- 3'ü 1 arada sarf malzemesi: Antiviral (SARS COV-2 dahil), Antibakteriyel Çek valf



CE
0459



Şarj portu
USB-C
Pil olmadan çalışma

Güç düğmesi

2.8" dokunmatik ekran

Tek kullanımlık Ergotraper®

çek valfli ve tek kullanımlık ağızlıklı
(Tabataba V2 ve V3 ile uyumlu).

3'ü 1 arada sarf malzemesi: Antiviral
(SARS COV-2 dahil), Antibakteriyel Çek valf

AKTİF VE PASİF TÜTÜN TÜKETİMİNE KARŞI YENİ MÜTTEFİKİNİZ

Basit ve hızlı kullanımlı **TABATABA v3®** sağlık profesyonellerine (doktorlar, tütün bağımlılığı uzmanları, iş sağlığı uzmanları, dernekler, doğumhaneler, göğüs hastalıkları uzmanları, eczaneler vb.) yönelik bir ölçüm cihazıdır.

Solunan havadaki CO seviyesini ölçer ve sigarayı bırakma bağlamında takibe olanak tanır. Ayrıca **ortam havasındaki CO seviyesini ölçmenizi de sağlar.** Birçok hekim tarafından da benimsenen bu yöntem aynı zamanda mükemmel bir eğitim aracıdır, aktif ve pasif sigara içimini bırakma konusunda farkındalık yaratma gücü tartışılmaz.

CİHAZINIZI PARMAKLARINIZIN UCUNDAN KONTROL EDİN

TABATABA V3 geniş dokunmatik ekranıyla benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bilgisayarlı, pilsiz ve kablosuz, daha fazla özgürlük sunuyor. Pili USB-C kablosu kullanılarak şarj edilir. **Bilgiler ve sonuçlar** anında cihaz üzerinden görüntülenebilir ve/veya **wifi aracılığıyla dışa aktarılabilir.**

TABATABAv3®

WEB UYGULAMASININ AVANTAJLARI

- Ürün bilgi yönetimi
(seri numarası, kalibrasyon tarihi vb.)
- Güvenli hasta bilgilerinin yönetimi
(kayıtlı ölçümler, hasta kimliği vb.)
- Cihaz Ayarları
(son kullanma süresi...)
- Verilerin CSV olarak dışa aktarılması
- PDF formatında hasta raporu oluşturma

AŞAMA 1



"Testi başlat"a basın

AŞAMA 2



Geri sayım sırasında hasta
nefes almalı ve ardından
nefesini tutmalıdır.

AŞAMA 3



Talimat kaybolana kadar
hasta yavaşça nefes
almalıdır.



PPM
%HbCO
%HbCOf

Sonuç PPM*,
%HbCO* veya %HbCOf
cinsinden görüntülenir



Verileri kaydet

*PPM = Milyon hava partikülü başına CO partikülü, %HbCO = karboksihemoglobin seviyesi, %HbCOf = fetal karboksihemoglobin düzeyi

CO ÖLÇÜM ARALIĞI	0-500 ppm
HATA PAYI	± 3 ppm
HÜCRE	Elektrokimyasal
HÜCRE ÖMRÜ	5 yıl
YILLIK SAPMA ORANI	≤ %10
KALİBRASYON SIKLIĞI	Yılda bir
ÖLÇÜM SÜRESİ	Ayarlanabilir
EKRAN	TFT-LCD 2,8" 320x240
SAKLAMA ORTAM SICAKLIĞI	0 - 50°C
KULLANIM ORTAM SICAKLIĞI	15 - 35°C
NEM	≤ %75
BATARYA	Lityum Polimer şarj edilebilir batarya
VOLTAJ	2200 mAh / 3.7 V
AKIM	≤ 2200 mA
REFERANS STANDARTLARI	NF ISO 2859-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 60601-1-6, EN 62366-1, EN 62366-1, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, NF EN ISO 14971, EN 62304/A1, ISO 20417, EN ISO 15223-1, NF EN ISO 13485
TIBBİ SINIF	Im
EBAT	115x70x35mm, 200x180x70mm (Paketli)
CİHAZ AĞIRLIĞI	180g, 400g (Paketli)

SİGARA
ÖLDÜRÜR...
HİÇBİR ŞEY
YAPMAMAK
DA ÖYLE!

"CO hesaplayıcınızı" elinizin altında
bulundurma refleksi edinini!

TABATABA v3®, aktif ve pasif sigara
içiminden kaynaklanan nefesle dışarı verilen
CO seviyesini hızlı ve verimli bir şekilde test
etmenize olanak tanır.

TEMEL AKSESUARLAR

Cihaz ile birlikte satılmaz:

- Tek kullanımlık ağızlık (250'lik kutu)
- Reusable trapper/valf

5
YIL
CİHAZ ÖMRÜ

BATARYA

2
YIL
GARANTİ

TABATABA®

Türkiye Distribütörü:
Solmed Medikal Sağlık Malz. San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulvarı No: 48/1 Karşıyaka/İZMİR
İletişim: 0 536 565 06 34 - solmedmedikal@hotmail.com



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex Fransa

Tel. +33 (0)4 72 34 89 89
Faks +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459